
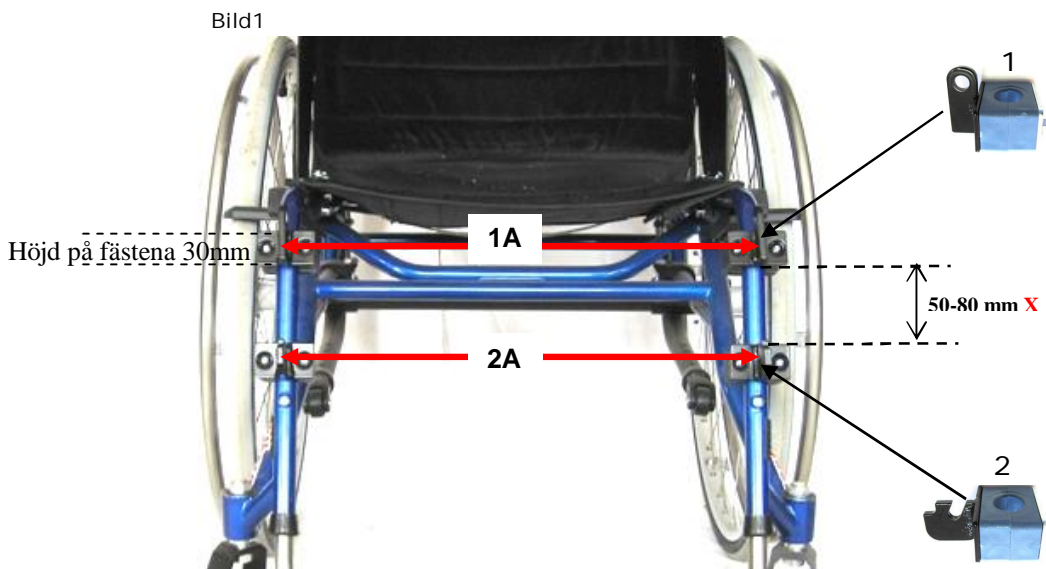


Passar din rullstol armbike kittet

Bild 1. Cykeln passar rullstolar med runda ram/rör och plattovala rör där fästena 1 och 2 ska sitta. 1 monteras så högt upp som möjligt. Höjden på 1 och 2 är 30mm. Avståndet mellan fästena 1 och 2 kan vara mellan: 50-80mm X

Uppge avståndet mellan rullstols ramen 1A och 2A i mm, åt från mitten av rören.
Mät även diametern på rören i mm.

OBS: Vid plattovala rör mät både den breda och den smalaste sidan. →

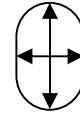

Snabbfästet till cykeln har tre lägen:

1. Cykelläge: rullstolen blir en 3-hjulig cykel.
2. Till och ifrån läge: När man kopplar till/från cykeln.
3. Rullstols läge: Cykeln hissas upp så att rullstolen används som rullstol med cykeln påkopplad.

Det finns 3 olika modeller av kittet:

- Smal: bredden på rullstolsramen vid 1A och 2A är mellan 24-34cm.
- Mellan: bredden på rullstolsramen vid 1A och 2A är mellan 34-45cm.
- Bred: bredden på rullstolsramen vid 1A och 2A är mellan 45-54cm.

Max vikt förare : 95kg

När du byter rullstol:

Byter du rullstol och håller dig inom samma mått som tidigare typ Mellan som är justerbar från 34 till 45 cm så behöver inte den ram delen bytas. Ändras diameter på rullstolens ram, måste man byta ut fästena 1 och 2.